

## VUE D'ENSEMBLE



### Touche (1.1) Verrouillage:

Appuyer pour déverrouiller les touches

### Touche (1.2) Etalonnage

L'étalonnage doit être effectué à chaque nouvelle installation et à chaque changement du resident/patient (voir au verso).

### Touche (2) Alerte de sortie de lit:

Activer et désactiver l'alerte de sortie de lit (appui bref) ou passer de l'alerte de sortie de lit à l'alerte de bord du lit (appui prolongé 2s)

### Touche (3) Alerte de mobilité:

Activer et désactiver l'alerte de mobilité (appui bref) ou régler la tolérance (appui prolongé 2s)

### Touche (4) Changement de position:

Appuyer pour documenter un changement de position effectué par le personnel soignant. Le voyant clignote brièvement pour confirmer que le changement de position a été documenté.

### Affichage de la mobilité:

Le feu passe au rouge lorsque la tolérance définie est dépassée (voir Alerte de mobilité)

### Voyant de sauvegarde / transfert USB:

Clignote pendant le transfert des données vers la clé USB

### Voyant d'alerte sonore:

Le voyant indique lorsque l'alerte sonore est activée. L'alerte se déclenche en cas de panne de courant ou en cas d'alerte de mobilité sans réponse. L'alerte peut être désactivée en maintenant simultanément les touches «Alerte de mobilité» et «Verrouillage» pendant 4 secondes.

### Voyant d'erreur:

Clignote en cas de problèmes ou d'erreurs.

Cas particuliers:

- Le voyant d'erreur clignote avec le feu orange pour signaler que l'unité de mesure n'est pas connectée.
- Le voyant d'erreur clignote avec le feu rouge pour signaler qu'il faut étalonner le Mobility Monitor.

### Voyant de présence secteur:

Le voyant indique lorsque l'appareil est sous tension

### Connexion prise secteur

### Port USB:

Pour le transfert des données avec l'option logicielle

### Connexion unité de mesure

### Connexion système d'appel soignant

## INSTALLATION



### Fixer l'unité de mesure

Enlever le matelas. Déterminer la partie centrale non mobile du lit (à hauteur du bassin). Positionner et fixer l'unité de mesure (étiquette vers le haut) sur la partie centrale non mobile du lit au moyen des sangles fournies.

**Important:** Assurez-vous que l'unité de mesure ne puisse pas glisser.



### Vérifier la fixation des câbles

Positionner et guider les câbles avec les serre-câbles fournis de sorte à ne pas endommager le système.

**Important:** Assurez-vous que rien n'obstrue les déplacements et manipulations du lit et que les câbles électriques ne puissent pas être coincés ni emmêlés.



### Tester le système d'appel soignant

Positionner de préférence l'unité d'affichage en appui sur un rebord du lit et brancher l'unité de mesure. Raccorder le système à la prise secteur avec le cordon d'alimentation fourni. Le raccord au système d'appel soignant est facultatif.

**Important:** Vérifier l'alerte appel soignant selon la procédure suivante: après déverrouillage (🔓), maintenir simultanément les touches «Alerte de sortie de lit» et «Alerte de mobilité» (🏠 + 🚶) pendant 2 secondes.



### Étalonnage en fonction du lit/matelas

Pour une détection précise des mouvements le Mobility Monitor doit être étalonné en fonction du matelas. Déverrouiller les touches (🔓). Maintenir ensuite simultanément les touches «Verrouillage» et «Changement de position» (🔒 + 🔄) pendant 4 secondes. Le feu de signalisation clignote pour signaler que le système est en cours d'étalonnage.

**Important:** L'étalonnage doit être effectué lit inoccupé et avec matelas.

L'étalonnage du système est requis lorsque:

- À chaque nouvelle installation
- À chaque changement de résident/patient
- En cas de remplacement de l'unité de mesure ou de l'unité d'affichage



Étalonnage terminé



Échec de l'étalonnage