


Mettre le patient dans le lit

Confirmation optionnelle que le patient est couché dans le lit.

1 Déverrouiller les touches

2 Confirmer occupation du lit

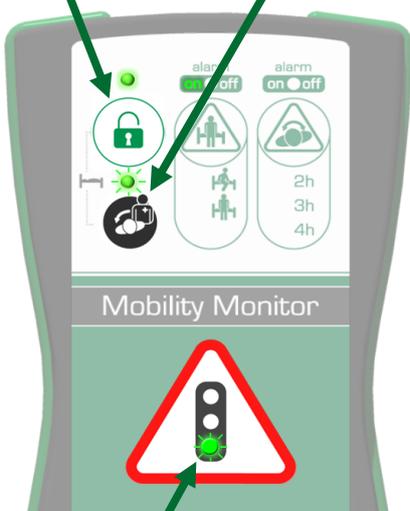

3 Le feu vert s'arrête de clignoter et reste continuellement allumé: l'alerte de sortie de lit est active (à condition que l'alerte de sortie de lit soit active).

Modifier les paramètres

activer / désactiver alertes

changer les paramètres



Déverrouiller les touches



Appui prolongé sur touche
Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur jaune commence à clignoter

Appui bref sur touche

Appuyer à plusieurs reprises pour activer/désactiver l'alerte



Appui bref sur touche

Appuyer à plusieurs reprises pour alterner entre les modes

on transmettre alertes à l'appel soignant
off alertes désactivées

  Alerte de **Bord** du lit
  Alerte de **Sortie** du lit

Aider le patient à sortir du lit

A quelle situation êtes-vous confronté ?

Le patient est couché dans le lit



Déverrouiller les touches



Le patient est assis au bord du lit



Déverrouiller les touches



Confirmer l'alerte



Appuyer sur la touche du voyant rouge clignotant.

alarm
on off Une alerte a été déclenchée
alarm
on off L'alerte a été confirmée

Désactiver l'alerte



Appuyer brièvement sur la touche pour désactiver l'alerte (off). Ceci empêche le dispositif de déclencher une alerte quand le patient sort de son lit.

alarm
on off L'alerte est désactivée

Le patient est déjà sorti du lit



Déverrouiller les touches



Confirmer l'alerte



Appuyer sur la touche du voyant rouge clignotant.

alarm
on off Une alerte a été déclenchée
alarm
on off L'alerte a été confirmée

Le patient peut quitter le lit



Réactiver l'alerte



alarm
on off L'alerte est activée