

# PANORAMICA



## INSTALLAZIONE



### Fissare l'unità sensore

Rimuovere innanzitutto il materasso dal letto. Scegliere la parte fissa del letto, solitamente situata al centro del letto.  
Fissare il sensore alla parte fissa del letto, usando le cinghie dell'unità sensore.

Importante: assicurarsi che l'etichettatura sia rivolta verso l'alto e che l'unità sensore non possa essere mossa.



### Controllare il posizionamento del cavo

Fissare il cavo del sensore al telaio del letto. Possono essere usati i fermalacci forniti in dotazione. Assicurarsi che il cavo del sensore non si incastri tra le parti del letto.

Importante: muovere le parti del letto e controllare che nulla rimanga bloccato!



### Testare la chiamata infermiere

Fissare il dispositivo portatile al letto e collegare l'unità sensore. Collegare alla corrente. Collegare il cavo di chiamata infermiere (opzionale).

Importante: controllare che il dispositivo di chiamata infermiere funzioni. Premere il pulsante di sblocco pulsanti (🔒), quindi contemporaneamente i pulsanti di allarme uscita dal letto e allarme mobilità (🚶 + 🚰) per 2 secondi.



### Calibrazione / Sintonizzazione con il materasso

L'unità sensore deve essere sintonizzata con il materasso per registrare correttamente i movimenti. Sbloccare le chiavi (1.) e calibrare il dispositivo (2.).

1. Premere il blocco pulsanti (🔒)
2. Premere il blocco pulsanti e il pulsante di riposizionamento (🔒 + 🔄) contemporaneamente per 4 secondi, finché non il semaforo non inizi a lampeggiare e il processo di calibrazione non si avvii.

Importante: il materasso deve essere posizionato sopra il sensore e il letto non deve essere occupato.

La calibrazione deve essere effettuata dopo ogni installazione e dopo ogni cambio paziente. Il dispositivo deve essere calibrato anche qualora l'unità sensore o il dispositivo portatile siano sostituiti.



Calibrazione effettuata  
con successo



Calibrazione fallita