


Portare a letto paziente


Conferma opzionale di paziente disteso a letto.

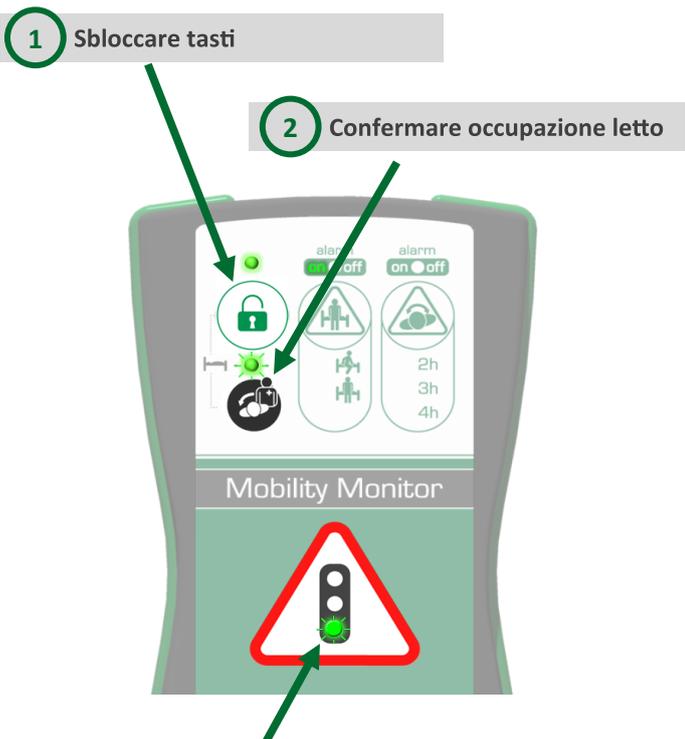

3 Il semaforo rosso non lampeggia più e si illumina di continuo : È attivato l'allarme di uscita dal letto (premesse che l'allarme sia stato inserito).


Portare a letto paziente

Conferma opzionale di paziente disteso a letto.

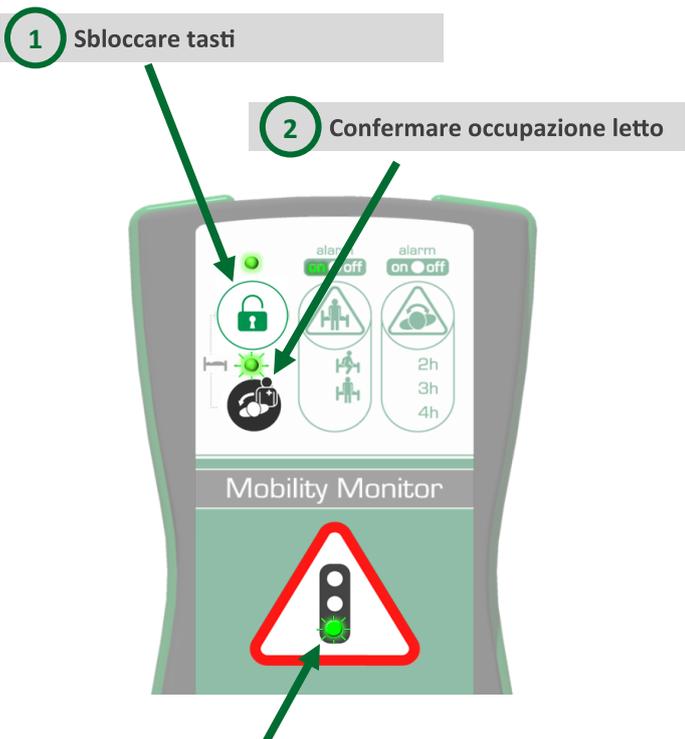


3 Il semaforo rosso non lampeggia più e si illumina di continuo : È attivato l'allarme di uscita dal letto (premesse che l'allarme sia stato inserito).

Modificare impostazioni

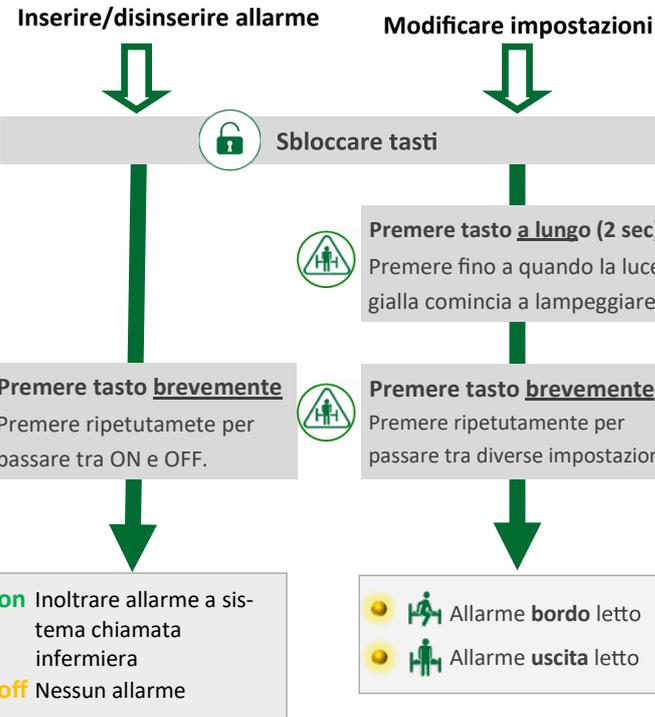

Modificare impostazioni

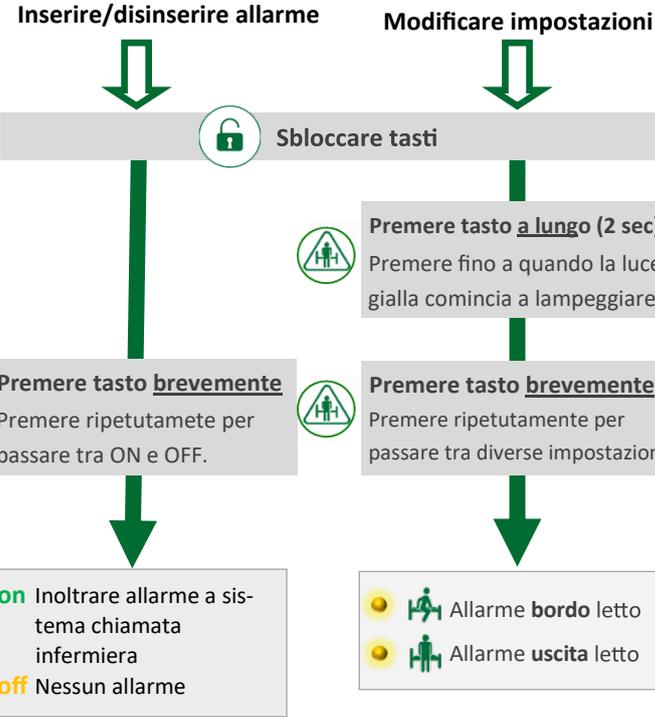

Alzare il paziente

Qual è la situazione?

Paziente ancora disteso a letto



Sbloccare tasti



Paziente seduto sul bordo del letto



Sbloccare tasti



Quietanzare allarme



Premere il pulsante vicino alla luce rossa lampeggiante

Allarme è stato generato
 Allarme è stato quietanzato

Disinserire allarme



Premere il pulsante brevemente per disinserire l'allarme (off), per non generare allarmi al recupero del paziente.

Allarme disinserito

Recuperare paziente

Paziente si è alzato



Sbloccare tasti



Quietanzare allarme



Premere il pulsante vicino alla luce rossa lampeggiante

Allarme è stato generato
 Allarme è stato quietanzato

Reinserire allarme



Allarme inserito

M-000019_it_2.2.1

Alzare il paziente

Qual è la situazione?

Paziente ancora disteso a letto



Sbloccare tasti



Paziente seduto sul bordo del letto



Sbloccare tasti



Quietanzare allarme



Premere il pulsante vicino alla luce rossa lampeggiante

Allarme è stato generato
 Allarme è stato quietanzato

Disinserire allarme



Premere il pulsante brevemente per disinserire l'allarme (off), per non generare allarmi al recupero del paziente.

Allarme disinserito

Recuperare paziente

Paziente si è alzato



Sbloccare tasti



Quietanzare allarme



Premere il pulsante vicino alla luce rossa lampeggiante

Allarme è stato generato
 Allarme è stato quietanzato

Reinserire allarme



Allarme inserito

M-000019_it_2.2.1