

Intensità

A secondo del peso del paziente, l'intensità deve essere adattata. (livello 1-4)

40 - 70 kg	● ○ ○ ○ ○
70 - 100 kg	⊗ ● ○ ○ ○
100 - 130 kg	⊗ ⊗ ● ○ ○
130 - 150 kg	⊗ ⊗ ⊗ ● ○


⊗ non consigliato ● minimo

Intervallo

L'intervallo di riposizionamento può essere impostato in quattro livelli.



Numero riposizionamenti per ora

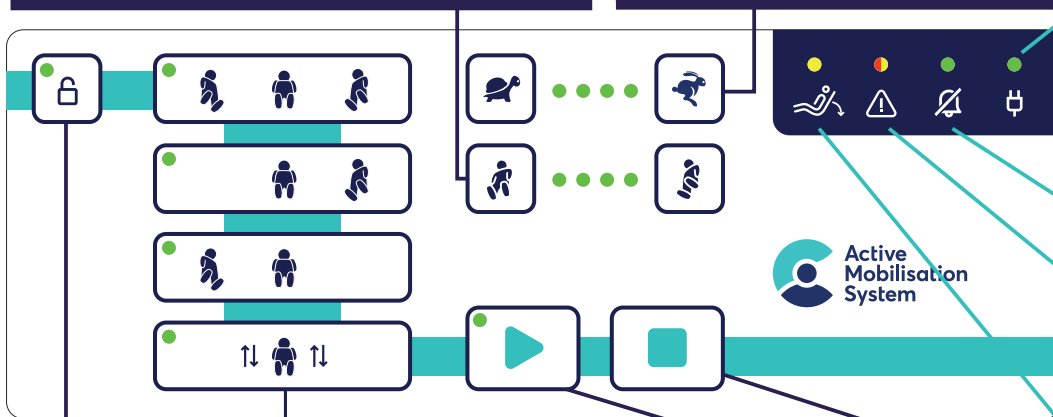

Blocco tasti

Premere brevemente:
Tasti sbloccati

Programmi

Selezionare il programma desiderato
 - riposizionamento a sinistra e a destra
 - riposizionamento a destra
 - riposizionamento a sinistra
 - stimolazione

Si accende la spia del progr. selezionato

Avvio



AMS avviato:
spia accesa

Stop



AMS fermato:
spia spenta

Alimentazione

La spia verde è accesa, quando l'AMS è collegato alla corrente. Lasciate l'AMS collegato alla corrente, anche quando fermo

Allarme acustico

Se la spia verde è accesa, l'allarme acustico è disattivato.

L'allarme acustico suona:

- quando l'AMS avviato viene staccato dalla corrente
- in caso di un errore tecnico
- se lo schienale è troppo ripido mentre l'AMS è avviato
- all'avviamento


Errore

In caso di un'errore, procedete così:

1. Verificate che tutte le spine siano inserite correttamente.
2. Risetate l'AMS (staccare il cavo di alimentazione, attendere che tutte le spie siano spente, ricollegare il cavo)
3. Riavviate il programma

Schienale troppo ripido

La spia lampeggia: l'AMS s'è fermato, lo schienale è oltre i 30°. L'AMS riparte appena lo schienale ha meno di 30°.

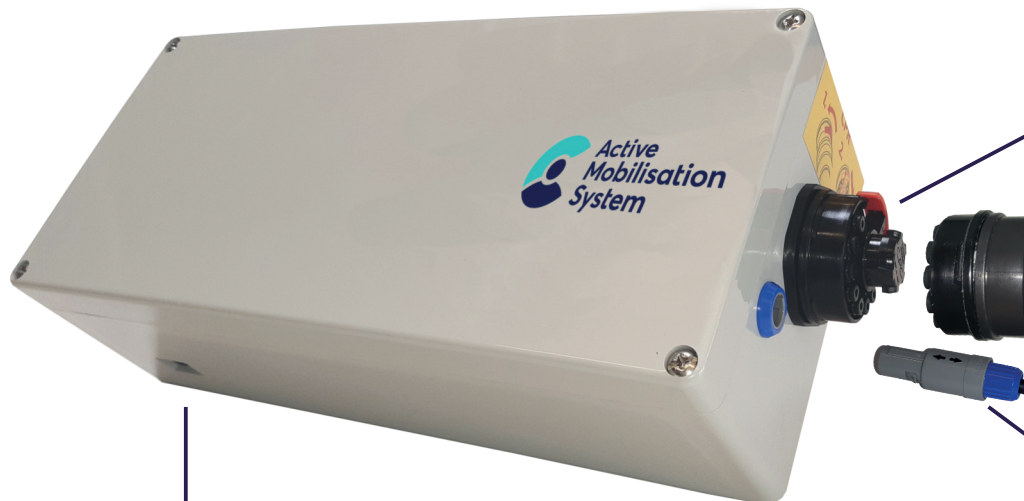

CPR

1. Aprire la sicura rossa (OPEN)
2. Staccare il raccordo



Raccordo pressione

Per attaccare:

1. Aprire la sicura rossa (OPEN)
2. Attaccare il raccordo
3. Chiudere la sicura rossa (LOCK)

Sensore inclinazione schienale

Inserire la spina fino in fondo.

Attacco elettrico