




Übersicht

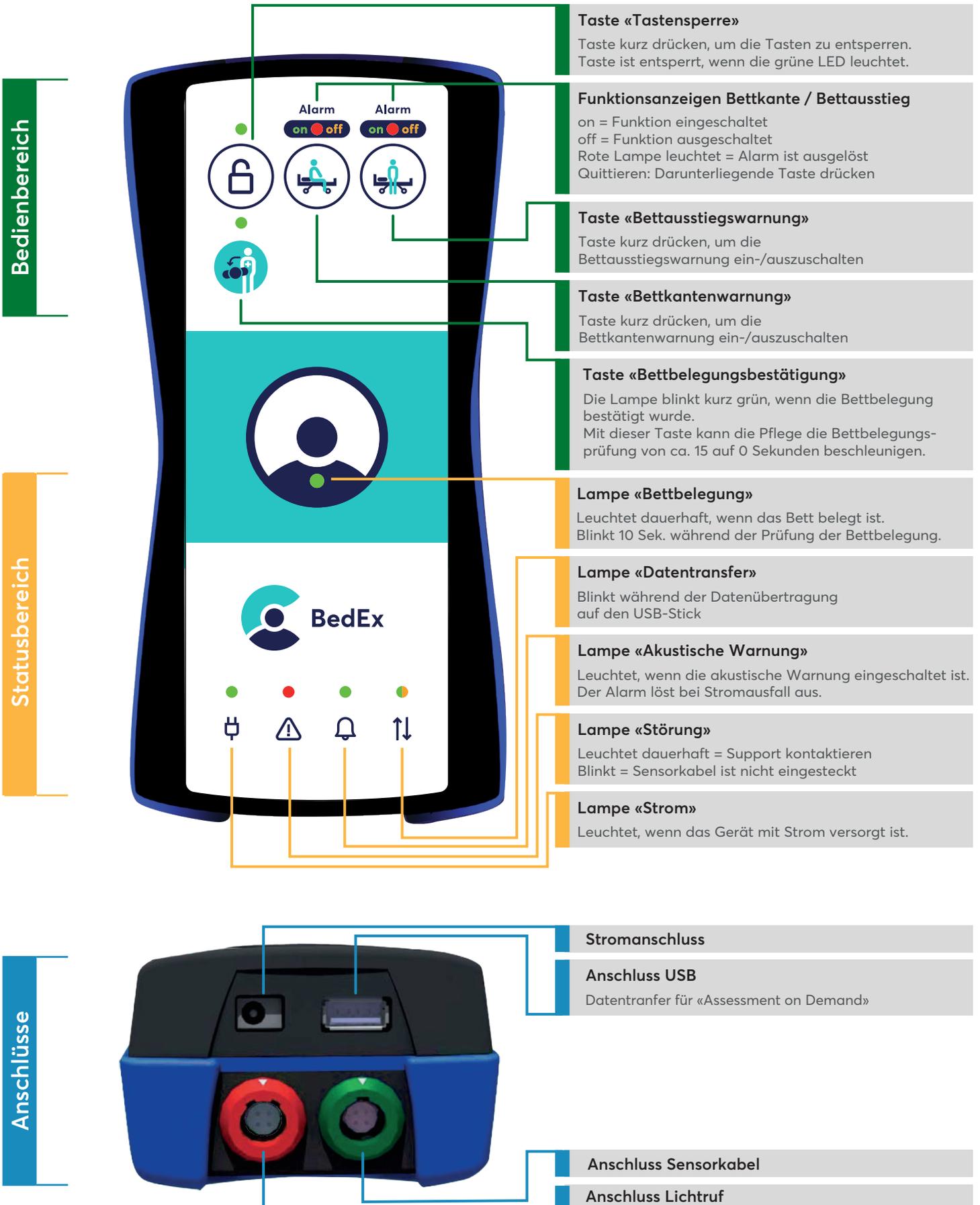



Installation



Befestigen der Sensorplatte

Entfernen Sie zuerst die Matratze. Stellen Sie fest, welches das nicht-bewegliche Mittelteil des Bettes (in Beckenhöhe) ist.

Befestigen Sie jetzt, mit Hilfe der Befestigungsgurten, die Sensoreinheit auf dem nicht-beweglichen Mittelteil des Bettes.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Beschriftung der Sensoreinheit nach oben zeigt und dass die Platte nicht verrutschen kann.



Überprüfen der Kabelführung

Befestigen Sie das Kabel der Sensoreinheit so am Bettrahmen, dass es nicht einklemmen kann. Hierfür können die mitgelieferten Kabelbinder genutzt werden.

Wichtig: Überprüfen Sie, ob nichts einklemmen kann, indem Sie das Bett in alle Positionen fahren.



Testen des Lichtrufs

Befestigen Sie das Bediengerät am Bett und schliessen Sie das Kabel der Sensoreinheit an. Schliessen Sie nun das Gerät am die Stromversorgung an. Ein Anschluss des Lichtrufkabels ist optional.

Wichtig: Sie können prüfen, ob der Lichtruf funktioniert, indem Sie die Tasten entsperren  und 2 Sekunden lang die Tasten «Bettausstiegswarnung» und «Immobilitätswarnung»  +  gleichzeitig gedrückt halten.